

FIPV Antígeno Prueba Rápida de Casete (Heces/Ascitis)

Ficha Técnica

REF VIIP-602 Español

USO PREVISTO

FIPV Antígeno Prueba Rápida de Casete (Heces/Ascitis) es una prueba inmunocromatográfica de flujo lateral indirecto para la detección cualitativa de antígeno del Virus de la Peritonitis Infecciosa Felina (VPIF Ag) en las heces o ascitis de felino.

PRINCIPIO

FIPV Antígeno Prueba Rápida de Casete es una prueba inmunocromatográfica de flujo lateral basada en el formato sándwich. El casete de prueba tiene una ventana de prueba. La ventana de prueba tiene una región T (prueba) y la región C (control). Durante la prueba, muestra se aplica en el pozo de muestra de casete. Los antígenos de FIPV, si están presentes en la muestra de heces o ascitis, reaccionan con los anticuerpos de anti-FIPV pre-revestidos en la tira de prueba. A continuación, la mezcla migra hacia arriba en la membrana cromatográficamente por acción capilar y reacciona con anticuerpos de anti-FIPV en la membrana en la región de la línea de prueba. Si la muestra contiene el antígeno de FIPV, aparecerá una línea de color en la región de línea de prueba que indica un resultado positivo. Si la muestra no contiene antígenos de FIPV, una línea de color no aparecerá en la región de línea de prueba que indica un resultado negativo. Para servir como un control de procedimiento, siempre aparecerá una línea de color en la región de línea de control que indica que se ha añadido un volumen adecuado de muestra y se ha producido la absorción de membranas.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Almacene en su envase a temperatura ambiente o refrigerado (2-30°C). La prueba es estable hasta la fecha de caducidad localizada en la bolsa sellada. La prueba debe permanecer en la bolsa sellada hasta su uso. **NO CONGELAR**. No utilice después de la fecha de caducidad.

PRECAUCIONES

- No utilice después de la fecha de caducidad.
- Maneje todas las muestras como si contuvieran agentes infecciosos. Observe las precauciones establecidas contra los peligros microbiológicos durante las pruebas y siga los procedimientos estándar para la eliminación adecuada de las muestras.

- Use guantes desechables y protección para los ojos cuando se están probando muestras.
- La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente a los resultados.
- No abra la bolsa de la prueba hasta que esté listo para iniciar la prueba.
- No reutilice el kit de prueba.
- No mezcle componentes de diferentes lotes y diferentes productos.

MATERIALES

Materiales Contenidos

- Casete de Prueba
- Goteros
- Tubos plásticos con búfer (para Heces)
- Hisopos
- Búfer (para Ascitis)
- Ficha Técnica

Materiales Necesarios Pero No Contenidos


- Temporizador
- Contenedores de colección de muestra

INSTRUCCIONES DE USO

Permita que el casete de prueba, la muestra, el búfer y/o los controles se equilibren a temperatura ambiente (15-30°C) antes de la prueba.

1. Para la prueba de heces:

a. Recoja las heces de felino con el hisopo del ano de felino o del suelo. La cantidad de hisopo fecal son como siguientes:

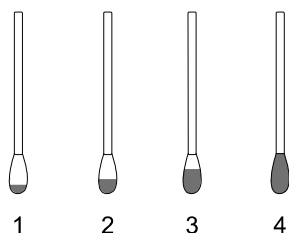

- No es suficiente
- Bueno
- Bueno
- Demasiado

b. Inserte el hisopo húmedo en el tubo de búfer proporcionado con el kit.

Mezcle y agite para asegurar una extracción suficiente de la muestra.

c. Coloque el casete de prueba en una superficie limpia y nivelada.


Sostenga el gotero verticalmente y transfiera 4 gotas de muestra extraída (aproximadamente 160µl) al pozo de la muestra (S) del casete de prueba y, a continuación, inicie el temporizador. Vea la ilustración siguiente.

Para la prueba de ascitis:

- Recoja ascitis felinas con contenedores de muestra.
- Coloque el casete de prueba en una superficie limpia y nivelada. Sostenga el gotero verticalmente y transfiera **1 gota de muestra** (aproximadamente 40 µl) y inmediatamente **agregue 3**

gotas de búfer (aproximadamente 120 µl) al pozo de muestra(S), luego inicie el temporizador. Vea la ilustración siguiente.

2. Lea el resultado en 15 minutos. No interprete los resultados después de 20 minutos.

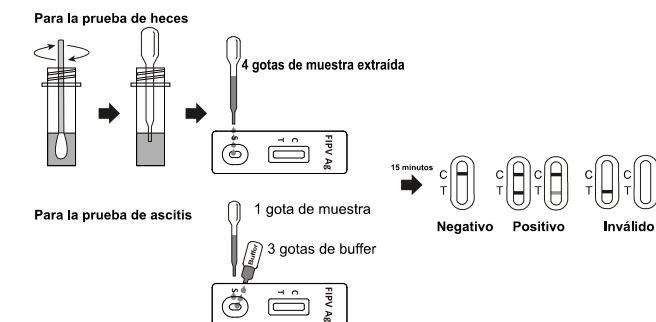

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Positivo: La presencia de la línea C y la línea T, no importa la línea T es clara o vaga.

Negativo: Sólo aparece la línea C clara.

Inválido: No hay línea de color aparece en la zona C, no importa si aparece la línea T.

LIMITACIÓN

FIPV Antígeno Prueba Rápida de Casete se utiliza in vitro solo para felinos. Todos los resultados deben considerarse con otra información clínica disponible del veterinario. Para confirmar los resultados, se recomiendan métodos de confirmación como la PCR.

Legenda dei simboli

	Solo per uso diagnostic in vitro		Test per kit		Monouso
	Conservare a 2-30°C		Usare entro		#Catalogo
	Non usare con confezione danneggiata		Numero lotto		Consultare le istruzioni per l'uso
	Fabbricante				



Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.
#550, Yinhai Street
Hangzhou Economic & Technological Development Area
Hangzhou - 310018, P. R. China
www.alltests.com.cn

Número: 145724701

Fecha Efectiva: 2019-11-27