

Prueba Rápida de antígeno CDV en Casete (Secreciones) Ficha Técnica

REF VIDV-502 Español

USO PREVISITO

El Prueba Rápida de antígeno CDV en Casete (Secreciones) es un ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral para la detección cualitativa del antígeno del virus del moquillo canino (CDV Ag) en las secreciones nasales / oculares de perros..

PRINCIPIO

Prueba Rápida de antígeno CDV en Casete es un ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral cualitativo para la detección de antígenos del virus del moquillo canino (CDV). El casete de prueba tiene una ventana de prueba. La ventana de prueba tiene una región T (prueba) y una región C (control). Durante la prueba, la muestra se aplica en el pozo de muestra en el casete. Los antígenos CDV, si están presentes en la muestra, reaccionan con los anticuerpos anti-CDV pre-recubiertos en la tira reactiva. La mezcla luego migra hacia arriba en la membrana cromatográficamente por acción capilar y reacciona con anticuerpos anti-CDV en la membrana en la región de la línea de prueba. Si el espécimen contiene el virus de la enfermedad canina, aparecerá una línea de color en la región de la línea de prueba que indica un resultado positivo. Si la muestra no contiene antígenos de CDV, no aparecerá una línea de color en la región de la línea de prueba, lo que indica un resultado negativo. Para servir como un control de procedimiento, siempre aparecerá una línea de color en la región de la línea de control que indica que se ha agregado el volumen adecuado de la muestra y que se ha producido la absorción de la membrana..

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Almacénelo como se incluye en la bolsa sellada a temperatura ambiente o refrigerado (2-30 ° C). El casete de prueba es estable hasta la fecha de caducidad impresa en la bolsa sellada. El casete de prueba debe permanecer en la bolsa sellada hasta su uso. **NO CONGELAR**. No usar más allá de la fecha de caducidad.

PRECAUCIONES

- No utilizar después de la fecha de caducidad.

- Manipule todas las muestras como si contuvieran agentes infecciosos. Observe las precauciones establecidas contra los peligros microbiológicos a lo largo de las pruebas y siga los procedimientos estándar para la eliminación adecuada de las muestras.
- Use guantes desechables y protección para los ojos cuando se estén analizando muestras.
- La humedad y la temperatura pueden afectar adversamente los resultados.
- No retire la bolsa el casete de prueba hasta usarlo.
- No reutilice el kit de prueba.
- No mezcle componentes de diferentes lotes y diferentes productos.

MATERIALES

Materiales provistos

- La prueba de la casetes
- Goteros
- Tubos de plástico con buffer
- Hisopos
- Ficha Técnica



Materiales requeridos pero no proporcionados

- Tiemporizador

INSTRUCCIÓN DE USO

Permita que el casete de prueba, la muestra, el buffer y / o los controles se equilibren a temperatura ambiente (15-30 °C) antes de la prueba.

- Retire el casete de prueba de la bolsa de aluminio y utilícelo lo antes posible. Los mejores resultados se obtendrán si el ensayo se realiza dentro de una hora.
- Recoja las secreciones oculares y nasales del perro con el hisopo proporcionado. Se absorba suficientemente húmedo con el hisopo.
Nota: Recoja la secreción ocular de los párpados superiores e inferiores, evite las secreciones en la esquina del ojo.
- Inserte el hisopo mojado en los tubo de plástico con buffer. Agítelo para asegurar una buena extracción de la muestra.
- Coloque el casete de prueba en una superficie limpia y nivelada. Sostenga el gotero verticalmente y transfiera **3 gotas de la muestra extraída (aproximadamente 120 µl)** al pozo de la muestra (S) del casete de prueba, luego inicie el temporizador. Vea la siguiente ilustración.
- Lea el resultado en **5-10 minutos**. No interpretar los resultados después de 15 minutos..

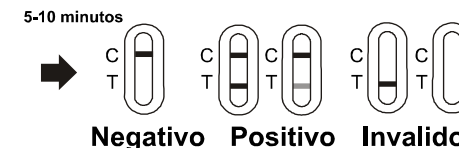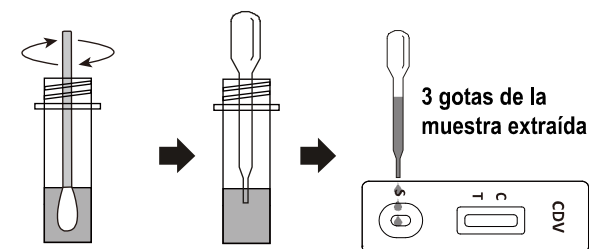

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Positivo: La presencia tanto de la línea C como de la línea T, independientemente de que la línea T sea fuerte o débil.

Negativo: Sólo aparece la línea C clara.

Inválido: No aparece ninguna línea de color en la región C, independientemente de la apariencia de la línea T.

LIMITACIÓN

Prueba Rápida de antígeno CDV en Casete es para uso diagnóstico in vitro solo para caninos. Todos los resultados deben considerarse con otra información clínica disponible del veterinario. Para confirmar los resultados, se recomiendan métodos de confirmación como la PCR.

Índice de símbolos		REF	# de Catálogo
	Atención, ver instrucciones de uso		Sólo para uso de diagnóstico in vitro
	Almacenar a 2-30 °C		Usar hasta
	No usar si el envase está dañado		Numero de Lote
			Fabricante
			No reutilizar
			Consulte las instrucciones de uso

Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.
#550, Yin Hai Street
Hangzhou Economic & Technological Development Area
Hangzhou - 310018, P. R. China
www.alltests.com.cn

Número: 145937900

Fecha Efectiva: 2018-11-15