

CPV+CCV+Giardia Lamblia Antígeno Combo

Prueba Rápida de Casete

(Heces/Vómito)

Ficha Técnica

REF VIPCG-635	Español
---------------	---------

USO PREVISTO

CPV + CCV + Giardia Lamblia Antígeno Combo Prueba Rápida de Casete (Heces/Vómito) es un casete combinado para diagnosticar diferencialmente la presencia de antígeno de parvovirus canino y antígeno de coronavirus canino y antígeno de Giardia lamblia en las heces o vómitos de los perros.

PRINCIPIO

CPV + CCV+ Giardia Lamblia Antígeno Combo Prueba Rápida de Casete basa en la prueba inmunocromatográfica de flujo lateral sándwich. El dispositivo de prueba tiene tres ventanas de prueba. Cada ventana de prueba tiene una zona T (prueba) y una zona C (control) invisible. Cuando la muestra se aplica en el pozo de la muestra en el casete, el líquido fluirá lateralmente en la superficie de la tira de prueba. Si hay suficiente antígeno de CPV o CCV o Giardia en la muestra, aparecerá una línea T visible en la ventana de prueba correspondiente. La línea C siempre debe aparecer después de aplicar una muestra, lo que indica un resultado válido. Por este medio, el casete puede indicar con precisión la presencia del antígeno de CPV o CCV o Giardia en la muestra.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Almacene en su envase a temperatura ambiente o refrigerado (2-30°C). La prueba es estable hasta la fecha de caducidad localizada en la bolsa sellada. La prueba debe permanecer en la bolsa sellada hasta su uso. **NO CONGELAR**. No utilice después de la fecha de caducidad.

PRECAUCIONES

- No utilice después de la fecha de caducidad.
- Maneje todas las muestras como si contuvieran agentes infecciosos. Observe las precauciones establecidas contra los peligros microbiológicos durante las pruebas y siga los procedimientos estándar para la eliminación adecuada de las muestras.
- Use guantes desechables y protección para los ojos cuando se están probando muestras.
- La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente a los resultados.
- No abra la bolsa de la prueba hasta que esté listo para iniciar la prueba.
- No reutilice el kit de prueba.

- No mezcle componentes de diferentes lotes y diferentes productos.

MATERIALES

Materials Provided

- Casetes de Prueba
- Tubos plásticos con búfer
- Hisopos
- Goteros
- Ficha Técnica


Materiales Necesarios Pero No Contenidos

- Temporizador

INSTRUCCIONES DE USO

Permita que el casete de prueba, la muestra, el búfer y/o los controles se equilibren a temperatura ambiente (15-30°C) antes de la prueba.

1. Recogja las heces o vómito de perro con el hisopo del ano de perro o del suelo. La cantidad de heces en hisopo es como siguiente:

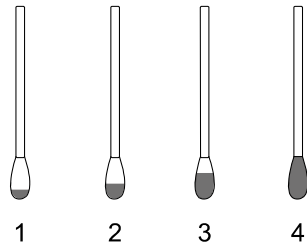


1. No es suficiente
2. Bueno
3. Bueno
4. Demasiado

2. Inserte el hisopo húmedo en el tubo de búfer proporcionado con el kit. Mézclelo y agítelo para asegurar una extracción suficiente de la muestra.

3. Coloque el casete de prueba en una superficie limpia y nivelada. Sostenga el gotero verticalmente y **transfiera 3 gotas de muestra extraída** (aproximadamente 120 µl) a cada pozo de muestra del casete de prueba, luego inicie el temporizador. Vea ilustración siguiente.

4. Lea el resultado en **5-10 minutos**. No interprete los resultados después de 15 minutos.

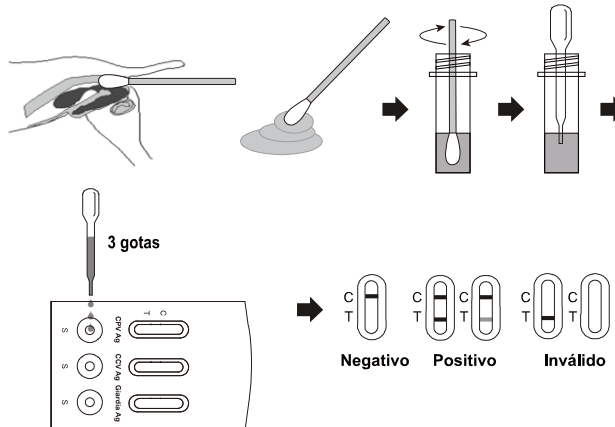

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Positivo: La presencia de la línea C y la línea T, no importa la línea T es clara o vaga.

Negativo: Sólo aparece la línea C clara.

Inválido: No hay línea de color aparece en la zona C, no importa si aparece la línea T.

LIMITACIÓN

CPV+CCV+ Giardia Lamblia Antígeno Combo Prueba Rápida de Casete solo para el diagnóstico canino in vitro. Todos los resultados deben considerarse con otra información clínica disponible del veterinario. Para confirmar los resultados, se recomiendan métodos de confirmación como PCR y microscopía.

Índice de Símbolos

	Sólo para uso diagnóstico in vitro		Pruebas por kit		No vuelva a utilizar
	Almacenar entre 2-30°C		Usar antes		# de Catálogo
	No utilizar si el paquete está dañado		Número de lote		Fabricante
	Consulte las instrucciones de uso				

Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.
 #550, Yin Hai Street
 Hangzhou Economic & Technological Development Area
 Hangzhou - 310018, P. R. China
 www.alltests.com.cn

Numero: 146167800
 Fecha de vigencia: 2019-12-23