

Toxo Antigéno Prueba Rápida de Casete (Heces/Suero/Plasma)

Ficha Técnica

REF VITO-602

Español

USO PREVISTO

Toxo Antigéno Prueba Rápida de Casete (Heces/Suero/Plasma) es una prueba inmunocromatográfica de flujo lateral para la detección cualitativa del antígeno de Toxoplasma gondii (Toxo Ag) en las heces o suero y plasma de los animales.

PRINCIPIO

Toxo Antigéno Prueba Rápida de Casete basa en la prueba inmunocromatográfica de flujo lateral sándwich. El casete de prueba tiene una ventana de prueba. La ventana de prueba tiene una zona T (prueba) y una zona C (control) invisibles. Cuando la muestra se aplica en el pozo de la muestra en el casete, el líquido fluirá lateralmente en la superficie de la tira de prueba. Si hay suficiente antígeno de Toxoplasma gondii en la muestra, aparecerá una línea visible en la zona T. La línea C siempre debe aparecer después de aplicar una muestra, lo que indica un resultado válido. Por este medio, el casete puede indicar con precisión la presencia del antígeno de Toxoplasma gondii en la muestra.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Almacene en su envase a temperatura ambiente o refrigerado (2-30°C). La prueba es estable hasta la fecha de caducidad localizada en la bolsa sellada. La prueba debe permanecer en la bolsa sellada hasta su uso. **NO CONGELAR.** No utilice después de la fecha de caducidad

PRECAUCIONES

- No utilice después de la fecha de caducidad.
- Maneje todas las muestras como si contuvieran agentes infecciosos. Observe las precauciones establecidas contra los peligros microbiológicos durante las pruebas y siga los procedimientos estándar para la eliminación adecuada de las muestras.
- Use guantes desechables y protección para los ojos cuando se están probando muestras.
- La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente a los resultados.
- No abra la bolsa de la prueba hasta que esté listo para iniciar la prueba.
- No reutilice el kit de prueba.

- No mezcle componentes de diferentes lotes y diferentes productos.

MATERIALES

Materiales Cotenido

- Casets de Prueba
- Hisopos
- Tubos plásticos con búfer
- Goteros
- Búfer
- Ficha Técnica

Materiales Necesarios Pero No Contenidos

- Temporizador
- Centrifugadora (para plasma)
- Contenedores de muestra
- Lanceta de sangre


INSTRUCCIONES DE USO

Permita que el casete de prueba, la muestra, el búfer y/o los controles se equilibren a temperatura ambiente (15-30°C) antes de la prueba.

- Saque el casete de prueba de la bolsa de aluminio y utilícelo lo más pronto posible. Se obtendrán los resultados mejores si la prueba se realiza dentro de una hora.
- Para Suero/Plasma:**
 - Recoja sangre entera fresca de porcino, y separe el suero o el plasma de la sangre lo más pronto posible para evitar la hemólisis. Utilice únicamente las muestras claras y no hemolizadas. No deje las muestras en temperatura ambiente durante períodos prolongados. Las muestras de suero y plasma pueden almacenarse a 2-8 °C durante un máximo de 3 días. Para el almacenamiento a largo plazo, las muestras deben mantenerse por debajo de -20 °C.
 - Sostenga el gotero verticalmente y transfiera **1 gota de muestra** (aproximadamente 40 µl) y inmediatamente añada **2 gotas de búfer** (aproximadamente 80 µl) al pozo de muestra(S), luego incie el temporizador.

Para heces:

- Recoja las heces frescas con hisopo proporcionado. La cantidad de hisopo fecal es como siguiente:

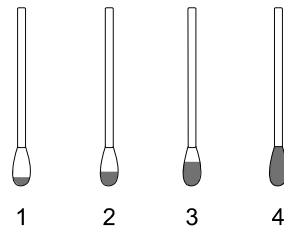


- No es suficiente
- Bueno
- Bueno
- Demasiado

- Inserte el hisopo húmedo en el tubo plástico con búfer. Mézclelo y agítelo para asegurar una extracción suficiente de la muestra.
- Transfiera **3 gotas de extracción de muestra**

- (aproximadamente 120 µl) al pozo de muestra.
- Interprete el resultado en 5-10 minutos. El resultado después de 15 minutos solo se considera como referencia.

Muestra de heces

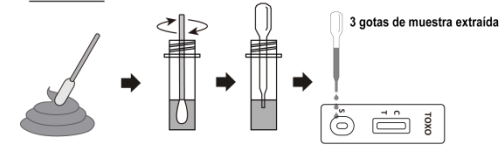

O

Muestra de Suero/Plasma



INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Positivo: La presencia de la línea C y la línea T, no importa la línea T es clara o vaga.

Negativo: Sólo aparece la línea C clara.

Inválido: No hay línea de color aparece en la zona C, no importa si aparece la línea T.

LIMITACIÓN

Toxo Antigéno Prueba Rápida de Casete es solo para el diagnóstico veterinario in vitro. Todos los resultados deben considerarse con otra información clínica disponible del veterinario. Para un resultado preciso, se sugiere aplicar otro método como examen microscópico o prueba de aislamiento de patógenos para la determinación final en la práctica.

Índice de Símbolos

	Sólo para uso diagnóstico in vitro		Pruebas por kit		No vuelva a utilizar
	Almacenar entre 2-30°C		Usar antes		# de Catálogo
	No utilizar si el paquete está dañado		Número de lote		Fabricante
	Consulte las instrucciones de uso				



Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.

#550, Yin Hai Street
Hangzhou Economic & Technological Development Area
Hangzhou - 310018, P. R. China
www.alltests.com.cn

Número: 146171500

Fecha Efectiva: 2019-12-25