

CONTROL DE CALIDAD

Un control interno está incluido en la prueba. Una línea de color aparece en la región de control (C) actúa como control interno del procedimiento. Confirma que hay suficiente volumen de muestra y una técnica empleada es la correcta. Un fondo claro es un control interno negativo del procedimiento. Si un color de fondo aparece en la ventana de resultados que interfiera con la capacidad de leer el resultado de la prueba, el resultado puede no ser válido. Se recomienda que un control positivo de GCH (que contiene 10-100mIU/ml GCH) y un control GCH negativo (con "0" mIU/ml de GCH) para verificar el comportamiento adecuado de la prueba cuando se recibe un nuevo envío de pruebas.

Numero: 553904
Fecha de vigencia: 2021-10-13